



Nombre

Faja sacrolumbar Active Support

Active Support Sacrolumbar Belt

Descripción

Código externo

1207-FW4

Código interno

P251WFW4

Modo de acción

Presta soporte semi firme a la zona lumbar, ayudando a limitar los movimientos excesivos. La compresión ajustable genera un efecto de calor local que contribuye a relajar la musculatura y disminuir el dolor. Los refuerzos laterales y el núcleo central reproducen la forma de la columna lumbar, ofreciendo un ajuste estable y reduciendo la tensión sobre la espalda. De esta forma, favorece la postura y reduce la sobrecarga mecánica en la zona lumbar.

Materialidad

Elaborado con tejido 3D de tecnología de punto tridimensional, este producto favorece la transpirabilidad y mantiene la zona fresca incluso durante un uso prolongado. Su soporte ergonómico reforzado combina refuerzos laterales y un núcleo central que reproducen la forma de la columna lumbar, ofreciendo un ajuste estable y reduciendo la tensión sobre la espalda. Confeccionado el cuerpo en poliéster y elastano, mientras que el sistema de ajuste es de poliamida, garantiza durabilidad, elasticidad y una sujeción precisa.

Tabla de talles / Código de barras

Según contorno de cintura

S	63 - 75 cm.	7798094542218
M	75 - 87 cm.	7798094542225
L	87 - 99 cm.	7798094542232
XL	99 - 110 cm.	7798094542249

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Abrir el velcro principal.
2. Colocar la faja alrededor del abdomen, con la parte reforzada hacia la zona lumbar. La parte ancha de la ballena central debe quedar hacia arriba.
3. Ajustar el abrojo principal y luego las bandas de ajuste laterales para una compresión adecuada.
4. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Composición

Cuerpo: Poliéster 65%, Elastano 35%
Ajuste: Poliamida 100%

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. El ajuste correcto es aquel que no restringe la respiración e incluso ayuda a una respiración más profunda.

Patologías

- * Espondilolisis
- * Espondiloartrosis
- * Lumbalgias
- * Lumbociatalgias
- * Sacroileítis

Productos relacionados

FW1 - FW3 - 610 - 611 - 600 - 615 - 620 - 630 - 635
640 - 660 - 670

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001.
AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-11
CUIT: 30-59163398-4.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global