



ACTIVÁ TUS DÍAS



Nombre

Codera Frío Calor
Hot/Cold Gel Elbow Sleeve

Descripción

La codera frío/calor contribuye al alivio del dolor, la inflamación y las molestias en el codo. Su diseño permite aplicar tanto frío como calor según las necesidades del usuario, proporcionando un alivio rápido y duradero. El frío, por su capacidad antiinflamatoria, ayuda en caso de lesiones con proceso inflamatorio como desgarros, esguinces, contusiones y tendinitis. El calor puede aplicarse en casos de contracturas, espasmos musculares o rigidez en articulaciones.

Código externo

1601-HC1

Código interno

P501PHC1

Modo de acción

Diseñado con hydrogel, contribuye al alivio del dolor, la inflamación y las molestias en el codo. Su diseño versátil permite aplicar frío o calor según la necesidad, brindando un alivio rápido y duradero.

Materialidad

Realizado en tejido elástico de poliamida y spandex, ofrece comodidad y ajuste perfecto. El hydrogel aporta alivio y bienestar, pudiendo usarse en frío o calor según la necesidad. Ideal para relajar, reducir molestias y recuperar la sensación de confort.

Tabla de talles / Código de barras

U	Universal	7798128676544
---	-----------	---------------

Instrucciones de uso

- Para frío:
1. Colocar el hidrogel en el freezer durante al menos 2 horas antes de su uso.
 2. Introducir el brazo en la manga, asegurándose de que cubra adecuadamente la zona dolorida.
 3. Se recomienda aplicar la compresa en sesiones de 15-20 minutos, varias veces al día según necesidad.
- Para calor:
1. Calentar en el microondas durante 30 segundos. El hidrogel debe estar a temperatura ambiente, no congelado.
 2. Si es necesario mayor calor, agregar incrementos de 10 segundos, sin exceder un total de 60 segundos, hasta alcanzar la temperatura deseada.
 3. Introducir el brazo en el producto, ubicándolo con el logo hacia el lateral, asegurándose de que cubra adecuadamente la zona dolorida.
 4. Se recomienda aplicar la compresa en sesiones de 15-20 minutos, varias veces al día según necesidad.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. En caso de presentarse fisuras en la bolsa contenedora, no inhalar ni ingerir el gel y evitar el contacto con los ojos y la piel. Deben controlarse los tiempos de aplicación para impedir congelamiento o quemaduras producidas por el exceso de frío o calor: el tiempo de aplicación, tanto para frío como para calor, debe oscilar entre 15 y 30 minutos. Antes de aplicar, verifica que la temperatura sea adecuada para evitar molestias en la piel.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro para eliminar residuos. Secar a la sombra en un lugar bien ventilado. No retorcer. Evitar el uso de productos químicos agresivos. Guardar en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso para preservar sus propiedades terapéuticas.

Patologías

- * Epicondilitis
- * Bursitis o tendinitis del codo
- * Dolor muscular postejercicio
- * Inflamaciones post-impacto



Composición

Tejido: poliamida 82% spandex 18%
Gel: hydrogel

Productos relacionados

HB1 - HR1 - HT1

Producto importado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. CUIT: 30-59163398-4.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.
Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748
Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global