

PROFIT

ACTIVÁ TUS DÍAS



Nombre

Masajeador Recovery

Recovery Massager

Descripción

El Masajeador Recovery combina tecnología de compresión de aire, calor y vibración, ofreciendo un masaje terapéutico ideal para aliviar dolores y reducir tensiones. Ayuda a mejorar la circulación sanguínea y linfática, y acelera la recuperación muscular post-ejercicio.

El diseño ergonómico e inalámbrico garantiza un calce perfecto y facilita su transporte a cualquier lugar.

Código externo

2203-MR

Código interno

P871PMR

Modo de acción

Diseñado para optimizar la recuperación muscular, el Masajeador Recovery combina compresión de aire, calor y vibración para estimular la circulación, aliviar tensiones y favorecer una relajación profunda.

Materialidad

Posee materiales resistentes y livianos, el Masajeador Recovery integra un sistema interno de compresión de aire y elementos térmicos que garantizan un funcionamiento eficiente y seguro. Su estructura ergonómica y acabado suave al tacto aportan confort durante el uso y durabilidad en el tiempo.

Tabla de talles / Código de barras

U	7798128676636
---	---------------

Instrucciones de uso

1. Ajuste los velcros para un calce firme pero cómodo. Utilice los extensores en caso necesario.
2. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para iniciar el masaje.
3. Use el botón de modo para seleccionar el tipo de masaje:
o Modo 1: Masajea el músculo y la articulación de forma alternada.
o Modo 2: Masajea solo el músculo.
o Modo 3: Masajea solo la articulación.
o Modo 4: Masajea el músculo y la articulación, mientras aplica vibración corta en la articulación.
o Modo 5: Masajea el músculo, mientras aplica vibración continua en la articulación.
o Modo 6: Masajea la articulación, mientras aplica vibración corta o continua en la misma.
4. Use el botón de calor para cambiar la temperatura: baja, media, alta.
5. El masajeador se apagará automáticamente al finalizar el tiempo programado.
6. En caso de querer apagarlo antes, mantener apretado el botón de encendido durante 3 segundos.

Cuidados y Recomendaciones

- La pantalla del panel debe limpiarse con un paño suave para evitar rayaduras.
- El área textil del producto no debe lavarse. Para limpieza, usar un paño húmedo o con alcohol para eliminar manchas o sudor.
- Guardar el dispositivo lejos del alcance de niños, y mantenerlo alejado de la humedad, altas temperaturas, luz solar directa o salpicaduras de agua.
- Guardar en lugar seco, sin exposición al sol o humedad.
- Cargar cada 2 meses si no se usa por períodos prolongados.

Envase	Caja
Cantidad	1 unidad
Contiene	• 1 masajeador inalámbrico AIR+HEAT • 3 extensores • 1 cable de carga USB • 1 manual de usuario
Color	Negro
NCM	9019.10.00.190P
Peso con envase	0,750 kg.
Volumen con envase	
Industria/Origen	China

Producto importado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. CUIT: 30-59163398-4. Uso sin prescripción.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

Productos relacionados

HC1 - HR1 - HB1 - HT1