



Nombre

Rodillera con Ballenas Laterales Knee Support with Lateral Stays

Código externo

03.02.R8

Código interno

16.R8

Descripción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico a la articulación. Sus cuatro ballenas espiraladas a ambos lados, limitan el desplazamiento lateral de la rodilla. La apertura rotuliana con refuerzo y las cintas de ajuste regulable mejoran la contención y estabilidad de la rótula, brindando soporte durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. Puede utilizarse en ambas rodillas.

Modo de acción

La rodillera con su almohadilla rotuliana y bandas de ajustes genera fuerzas que mantienen a la articulación en una posición neutra, promoviendo un mayor nivel de soporte y ajuste del producto. Las cuatro ballenas laterales limitan el movimiento de la rodilla sin inmovilizarla. El alivio en distensiones, esguinces y demás lesiones de rodilla se logra mediante la estabilización de la rótula, aplicando compresión moderada sobre la zona. Brinda calor terapéutico, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración.

Materialidad

Confeccionada en neoprene de 3.5 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en su cara externa y plush de poliamida en su cara interna. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento exterior ofrece control de elasticidad y una suave textura. El plush de su cara interna es cómodo al contacto con la piel y contribuye a la contención del calor.

Tabla de talles / Código de barras

Según contorno 5 cm, por sobre la rótula

S	36 - 41 cm.	7798094546384
M	41 - 46 cm.	7798094546391
L	46 - 51 cm.	7798094546407
XL	51 - 56 cm.	7798094546414

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar los abrojos.
2. Colocar la rodillera situando el orificio sobre la rótula, el logo PROFIT se encuentra ubicado en la parte inferior, al frente.
3. Ajustar los abrojos según necesidad y acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrado los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- * Subluxaciones de rótula
- * Artritis rótulo femoral
- * Esguinces
- * Inestabilidades mediolaterales
- * Artrosis
- * Post operatorio
- * Desorden patelofemoral leve
- * Distensiones
- * Torceduras
- * Hinchazón
- * Tendinitis patelar
- * Contusiones
- * Distensiones ligamentarias laterales leves
- * Inestabilidades capsuloligamentosas

Composición

Interior: Policloropreno 100%
Exterior: Poliamida 100%

Productos relacionados

R2 - R3 - R4 - R5 - R6 - R7 - R9 - ER1 - RAS

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	9021.10.10
Peso sin envase	160 g / 0,160 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global