



Nombre

Tobillera con ballenas laterales

Ankle support with lateral stays

Código externo

03.01.T3

Código interno

16.T3

Descripción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones leves, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico a la articulación. Posee ballenas espiraladas a ambos lados que por su flexibilidad limitan los movimientos laterales del tobillo, sin llegar a inmovilizar la articulación. El ajuste moderado y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. Puede utilizarse en ambos tobillos.

Modo de acción

Las ballenas espiraladas restringen los movimientos de pronación y supinación, brindando estabilidad a la articulación durante la práctica deportiva. La compresión moderada logra el alivio de distensiones, esguinces y demás lesiones. Su cierre con abrojos permite que el producto se adapte a los distintos usuarios y aplique la compresión adecuada.

Materialidad

Confeccionada en neoprene de 3,5 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en su cara externa y plush de poliamida en su cara interna. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislamiento térmico, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento exterior ofrece control de elasticidad y una suave textura. El plush de su cara interna es cómodo al contacto con la piel y contribuye a la contención del calor.

Tabla de tallas / Código de barras

Según número de calzado.

S	35 - 38	7798094546506
M	38 - 40	7798094546513
L	40 - 42	7798094546520
XL	42 - 45	7798094546537

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un tamaño diferente al indicado en la tabla.

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	6307.90.90
Peso sin envase	90 g / 0,09 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

Instrucciones de uso

1. Introducir el pie en la tobillera. El logo PROFIT debe quedar en la parte superior, hacia el frente.
2. Deslizar hacia arriba, haciendo que el orificio coincida con el talón.
3. Cerrar el abrojo y acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrado el abrojo. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Composición

Interior: Policloropreno 100%,
Exterior: Poliamida 100%

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Patologías

- * Esguinces severos
- * Artritis reumatoidea
- * Síndrome del túnel tarsal - o síndrome del túnel tarsiano o neuralgia del nervio tibial posterior-
- * Pie cavo varo, recto o valgo
- * Pie cavo anterior o posterior
- * Inestabilidad
- * Pie zambo
- * Afecciones ligamentarias
- * Inestabilidad crónica del tobillo
- * Luxaciones
- * Recidivas

Productos relacionados

T1 - T2 - ET1 - TAS - 6400