

# PROFIT

ACTIVÁ TUS DÍAS



Nombre

## Tobillera Air Sport con silicona

Air Sport ankle support with silicone pads

Código externo

1301-TAS3

Código interno

P461PTAS3

Descripción

Contribuye a una rápida desinflamación y rehabilitación de lesiones, mediante la aplicación de compresión a la articulación proporcionada por los soportes de silicona. Ayuda a prevenir torceduras, esguinces y dolores articulares. Tejida a partir de hilados de alto rendimiento, obteniendo así un producto respirable, que absorbe, evapora rápidamente la transpiración y mantiene la piel seca y libre de irritaciones. El ajuste moderado y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva. Su tecnología de tejido sin costuras permite eliminar roces y molestias causadas por las terminaciones internas, maximizando el confort.

Modo de acción

La tobillera aplica fuerzas multidireccionales, que mantienen la articulación en una posición neutra. Los soportes de silicona estabilizan y protegen el tobillo, proporcionando apoyo articular. Además, brinda mayor presión en la zona mejorando la circulación sanguínea, favoreciendo la reducción de edemas.

Materialidad

El spandex, junto a la goma forrada, brindan elasticidad al producto. El spandex es un material de secado rápido, resistente a la sudoración, que no genera electricidad estática y cuenta con un alto grado de recuperación elástica. La poliamida, posee un excelente cuadro de propiedades mecánicas, tenacidad elevada y características de deslizamiento y resistencia al desgaste superiores. Este material también se destaca por su alto grado de absorción y evaporación de la humedad.

Tabla de talles / Código de barras

Según número de calzado.

<b>S</b>	34 - 37	7798128676391
<b>M</b>	38 - 41	7798128676407
<b>L</b>	42 - 44	7798128676414
<b>XL</b>	45 - 47	7798128676421

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro y naranja
NCM	6307.90.90.900Q
Peso sin envase	104 gr.
Peso con envase	112 gr.
Volumen con envase	
Industria/Origen	China

Producto importado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-39 CUIT: 30-59163398-4. Uso sin prescripción.

**Director Técnico:**  
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

**Dirección:**  
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

**Atención al Consumidor:**  
www.ptm.global - info@ptm.global

Instrucciones de uso

1. Tomar la tobillera por la abertura con la línea de contorno blanca, introducir el pie hasta que el sector rayado quede ubicado sobre el talón y el logo PROFIT en la parte superior.
2. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. No planchar. No usar lavandina. No retorcer. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No exponer al sol o altas temperaturas.

Composición

Base: Elastodieno 49% Poliamida 43%  
Elastano 8%  
Ferrería: Poliamida 100%

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Patologías

- \* Esguinces
- \* Inestabilidad
- \* Tendinitis
- \* Afecciones ligamentarias
- \* Contusiones
- \* Distensiones
- \* Esguinces leves
- \* Hinchazón

Productos relacionados

TAS - TAS2 - MAS - RAS - MASD