

PROFIT

ACTIVÁ TUS DÍAS



Nombre

Faja Sacrolumbar Lumbo-Sacral Support

Código externo

02.07.F1

Código interno

16.F1

Descripción

Brinda soporte, calor terapéutico y compresión a la zona media y baja del tronco. Cuenta con seis ballenas flexibles en el área sacrolumbar que contribuyen a estabilizar la columna vertebral, mejorando la postura, y el desarrollo de la fuerza. El cinturón de ajuste, aporta fuerzas adicionales acordes a cada tratamiento. Su sistema de cierre con abrojo permite regular el producto adaptándose a las diferentes necesidades y anatomías del usuario.

Modo de acción

Mediante fuerzas de compresión, la faja ayuda a sostener la zona sacrolumbar, dejándola en posición neutral, colaborando con la recuperación de las patologías que afectan a la zona así como también con las inflamaciones locales. El cinturón permite aplicar fuerzas adicionales de compresión, sin necesidad de desajustar la faja. Brinda calor terapéutico, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración.

Materialidad

Confeccionada en neoprene de 3 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en ambas caras. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento exterior ofrece control de elasticidad y una suave textura.

Tabla de talles / Código de barras

Según contorno de cintura

S	63 - 75 cm.	7798094545950
M	75 - 87 cm.	7798094545967
L	87 - 99 cm.	7798094545974
XL	99 - 111 cm.	7798128670627

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	9021.10.10
Peso sin envase	355 g / 0,355 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-11 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

Instrucciones de uso

1. Desabrochar el abrojo.
2. Colocar la faja alrededor del abdomen. El logo Profit debe quedar en la parte superior del frente.
3. Cerrar el abrojo de la faja.
4. Ajustar el cinturón, abrochando primero la tira derecha y luego la izquierda.
5. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrado el abrojo. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Composición

Interior: Policloropreno 100%
Exterior: Poliamida 100%

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. El ajuste correcto, es aquel que no restringe la respiración e incluso ayuda a una respiración más profunda.

Patologías

- * Sacroileítis
- * Patologías lumbares inespecíficas
- * Profilaxis
- * Lumbalgias crónicas
- * Lumbalgias leves
- * Desgarros abdominales
- * Eventraciones medias
- * Hernias
- * Lumbociática o lumbociatalgias

Productos relacionados

F2