

PROFIT

ACTIVÁ TUS DÍAS



Nombre

Faja Abdominal Abdominal Binder

Código externo

02.05.F2

Código interno

16.F2

Descripción

Brinda soporte, calor terapéutico y compresión a la zona media y baja del tronco, contribuyendo a estabilizar la columna durante la práctica deportiva. Su sistema de cierre con abrojo permite regular el producto adaptándose a las diferentes necesidades y anatomías del usuario.

Modo de acción

Mediante fuerzas de compresión, la faja ayuda a sostener la zona sacrolumbar, dejándola en posición neutral, colaborando con la recuperación de las patologías que afectan a la zona así como también con las inflamaciones locales. Brinda calor terapéutico, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración.

Materialidad

Confeccionada en neoprene de 3 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en ambas caras. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento exterior ofrece control de elasticidad y una suave textura.

Tabla de talles / Código de barras

Según contorno de cintura

S	63 - 75 cm.	7798094545981
M	75 - 87 cm.	7798094545998
L	87 - 99 cm.	7798094546001
XL	99 - 111 cm.	7798094546018

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar el abrojo.
2. Colocar la faja alrededor del abdomen. El logo Profit debe quedar en la parte superior del frente.
3. Ajustar el abrojo y acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. El ajuste correcto, es aquel que no restringe la respiración e incluso ayuda a una respiración más profunda.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrado el abrojo. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- * Lumbalgias crónicas
- * Lumbalgias leves
- * Desgarros abdominales
- * Eventraciones medias
- * Hernias
- * Lumbociática

Composición

Interior: Policloropreno 100%
Exterior: Poliamida 100%

Productos relacionados

F1

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	6212.20.00
Peso sin envase	280 g / 0,28 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-11 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

ficha_de_producto_F2_v.1

FTM