



Nombre

Hombroera Shoulder Support

Código externo

02.02.H1

Código interno

16.H1

Descripción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico a la articulación. Brinda soporte y estabilidad al hombro, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. Su peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. Puede utilizarse en ambos brazos.

Modo de acción

Mediante la estabilización del hombro, aplicando compresión moderada, se logra el alivio de distensiones, esguinces y demás lesiones. Brinda calor terapéutico, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración.

Materialidad

Confeccionada en neoprene de 3 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en ambas caras. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento exterior ofrece control de elasticidad y una suave textura.

Tabla de talles / Código de barras

Según contorno de brazo - bíceps

S	24 - 28 cm.	7798128672997
M	28 - 32 cm.	7798128673000
L	32 - 36 cm.	7798128673017
XL	36 - 40 cm.	7798128673024

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Introducir el brazo por el orificio pequeño. El logo PROFIT debe quedar en la parte inferior externa del brazo.
2. Pasar la banda por la cabeza y el brazo opuesto. La misma debe quedar bajo la axila, atravesando el pecho.
3. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- * Traumatismo escápulo-humeral
- * Traumatismo acromio-clavicular
- * Bursitis de hombro
- * Inestabilidad de la articulación
- * Esguinces
- * Tendinitis
- * Artrosis
- * Subluxaciones
- * Dislocación del hombro

Composición

Interior: Policloropreno 100%
Exterior: Poliamida 100%

Productos relacionados

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	6307.90.90
Peso sin envase	75 g / 0,075 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global