



Nombre

Porta Pack Gel Frío-calor Compress Holder

Código externo

10.01.PG

Código interno

16.PG

Descripción

Contiene los packs de gel frío-calor, otorgando una fácil colocación y regulabilidad de ajuste, adaptándose a las diferentes anatomías y necesidades del usuario. Brinda frío o calor terapéutico, ayudando a aliviar lesiones, contracturas, desgarros y dolencias. Su materialidad y sistema de cierre con tapa hacen un producto hermético e impermeable. Se adapta a la forma del cuerpo por lo que resulta anatómico y cómodo al uso. No incluye pack de gel.

Modo de acción

El frío, por su capacidad antiinflamatoria, ayuda en casos de lesiones con proceso inflamatorio como desgarros, esguinces, contusiones y tendinitis. El calor se debe aplicar en casos de contracturas, espasmos musculares o rigidez en articulaciones.

Materialidad

Confeccionado en neoprene de 1.5 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en ambas caras. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento exterior ofrece control de elasticidad y una suave textura.

Tabla de talles / Código de barras

UNIVERSAL

7798094549446

Instrucciones de uso

1. Desabrochar los abrojos.
2. Colocar la compresa de gel en el bolsillo y luego este sobre la zona afectada, con la cara de neoprene del lado externo.
3. Ajustar y cerrar abrojos.
4. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. Deben controlarse los tiempos de aplicación para impedir congelamiento o quemaduras producidas por el exceso de frío o calor: el tiempo de aplicación, tanto para frío como para calor, debe oscilar entre 15 y 30 minutos.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrado los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- * Traumatismos
- * Dolores menstruales
- * Tensiones musculares
- * Dolores artríticos
- * Contracturas
- * Desgarros
- * Espasmos musculares
- * Luxaciones
- * Tendinitis
- * Contusiones
- * Retracciones musculares

Composición

Interior: Policloropreno 100%,
Exterior: Poliamida 100%

Productos relacionados

1313 - 1325 - 2425 - BH

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	6307.90.90
Peso sin envase	75 g / 0,075 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto distribuido por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global