

PROFIT

ACTIVÁ TUS DÍAS



Nombre

Rodillera abierta corta

Short-sleeve knee support

Código externo

03.02.R7

Código interno

16.R7

Descripción

Brinda soporte a la rótula, posicionándola en su lugar natural. Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico. Su diseño abierto universal permite una fácil colocación y ajuste, adaptándose a las diferentes anatomías y necesidades del usuario. Su peso ligero y ajuste regulable conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir dolores articulares. Puede utilizarse en ambas rodillas.

Modo de acción

La apertura rotuliana posee una almohadilla circular de refuerzo que mantiene a la rótula en una posición neutra. De esta manera contiene la zona afectada y brinda seguridad durante la performance deportiva. La fuerza que ejerce la rodillera tiene acción terapéutica sobre ligamentos, músculos y huesos. El tipo de ajuste permite aplicar la compresión necesaria, la cual puede ir variando durante el tratamiento. Brinda calor terapéutico, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración.

Materialidad

Confeccionada en neoprene de 3,5 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en su cara externa y plush de poliamida en su cara interna. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislamiento térmico, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento exterior ofrece control de elasticidad y una suave textura. El plush de su cara interna es confortable al contacto con la piel y contribuye a la a contención del calor.

Tabla de tallas / Código de barras

UNIVERSAL

7798094548395

Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un tamaño diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar y quitar los abrojos protectores.
2. Colocar la rodillera situando el orificio sobre la rótula, el logo PROFIT se encuentra ubicado en la tira inferior.
3. Pasar las cintas rodeando la rodilla y abrochar los abrojos ajustando según necesidad.
4. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	6307.90.90
Peso sin envase	60 g. / 0.06 Kg.
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto importado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Composición

Interior: Policloropreno 100%,
Exterior: Poliamida 100%

Patologías

- * Ligeras contusiones
- * Artrosis
- * Artritis
- * Síndrome patelo-femoral
- * Tendinitis patelar
- * Tendinosis
- * Tendinitis
- * Tenosinovitis
- * Patología meniscal
- * Lesiones osteocondrales
- * Osteocondritis disecante

Productos relacionados

R2 - R3 - R4 - R5 - R6 - R8 - R9 - ER1