



Nombre

Tobillera abierta universal con ajuste en ocho

Universal open ankle support with figure eight strap

Código externo

03.01.TAU

Código interno

16.TAU

Descripción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones leves, mediante la aplicación de una compresión leve y calor terapéutico a la articulación. Su diseño completamente abierto permite una fácil colocación y ajuste, adaptándose a diferentes anatomías y necesidades terapéuticas. El ajuste regulable y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. Puede utilizarse en ambos tobillos.

Modo de acción

La compresión que aplica la tobillera mantiene la articulación en una posición neutra. Mediante la estabilización de la articulación, aplicando calor terapéutico y compresión moderada; se logra el alivio de distensiones, esguinces y demás lesiones.

Materialidad

Confeccionada en neoprene de 3 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en su cara interna y externa. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento ofrece control de elasticidad y una suave textura.

Tabla de talles / Código de barras

Se adapta a todos los talles.

Universal

7798128675509

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. A apoyar la tobillera abierta sobre una superficie plana (ej. suelo), con las tiras elásticas apuntando hacia el empeine. La felpa de los abrojos debe quedar de cara a la superficie plana.
2. Colocar el pie sobre la tobillera, asegurarse que el talón coincida con el orificio trasero del soporte.
3. Cerrar abrojos superiores e inferiores, envolviendo el tobillo y empeine.
4. Cruzar las tiras elásticas por sobre el empeine y ajustarlas en la parte posterior del tobillo.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Envase

Bolsa

Cantidad

1 unidad

Color

Negro

NCM

6307.90.90.900Q

Peso sin envase

49 g / 0.049 kg

Peso con envase

Volumen con envase

Industria/Origen

Argentina

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrado el abrojo. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- * Esguinces
- * Inestabilidad
- * Tendinitis
- * Síndrome del túnel tarsal
- * Pie cavo varo, recto o valgo
- * Pie cavo anterior o posterior
- * Pie zambo
- * Afecciones ligamentarias

Composición

Interior: Policloropreno 100%
Exterior: Poliamida 100%

Productos relacionados

T1 - T2 - T3 - ET1 - TAS - 6400

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global